

# PRODUCT GUIDE



CE ISO 13485



# MemoryTrack<sup>®</sup>

## Alinhamento

*Tecnologia em camadas para mais conforto e eficácia*

A placa para alinhador MemoryTrack<sup>®</sup> Alinhamento **combina força suave e consistente**, proporcionando controle superior da movimentação dentária. Também oferece **alta transparência, resistência e conforto superiores**, com apenas 0,76 mm de espessura.



# MemoryTrack<sup>®</sup>

## Alinhamento

### A melhor opção para alinhadores in office



#### TRIPLA CAMADA

Cada camada desempenha uma função específica e, juntas, oferecem o melhor de cada tipo de placa monocamada: resistência e conforto.



#### MAIOR DURABILIDADE

A placa forma alinhadores mais resistentes e duráveis, resultando em dispositivos esteticamente eficazes ao longo do tratamento. Isso reduz o trabalho e os custos para o dentista, além de minimizar a necessidade de substituições frequentes.



#### CAMADA INTERNA MACIA

A estrutura macia reduz a dor na fase de adaptação, proporcionando maior conforto ao paciente, enquanto as camadas externas aplicam a força ideal.



#### MANTÉM O TRACKING

Com as três camadas da MemoryTrack<sup>®</sup>, o alinhador mantém um ajuste preciso ao longo do tratamento, reduzindo a probabilidade de desajustes ou falhas na movimentação planejada.



#### RESISTENTE A MANCHAS

Menor propensão à pigmentação e manchas graças à baixa porosidade da camada externa, preservando a alta transparência.



#### SEM DESPERDÍCIOS

Placas tripla camada de 0,76mm embaladas a vácuo, com apenas 10 unidades, evitando o risco de perda em comparação com opções de maior quantidade por pacote.

# MemoryTrack® Alinhamento Tripla Camada é livre de BPA

## SAÚDE E CUIDADO PARA OS SEUS PACIENTES

A Placa MemoryTrack® Alinhamento Tripla Camada é **100% livre de BPA** (Bisfenol A), garantindo mais segurança e **preservando a saúde de seus pacientes.**

## ENTENDA POR QUE O BPA É NOCIVO

O BPA é uma substância encontrada em plásticos de policarbonato, comumente usados em garrafas de água e copos reutilizáveis. O problema surge quando esses plásticos são expostos a altas temperaturas, **liberando toxinas prejudiciais à saúde que podem causar alterações hormonais e contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças.**



# DICAS CLÍNICAS



- **Fácil armazenamento:** Assim como todas as placas multicamadas, a placa de tripla camada deve ser termoformada em até 3 horas após a abertura da bolsa protetora. As não utilizadas podem ser facilmente protegidas com uma seladora, embalagem ZIP, caixa plástica com sílica gel, entre outros métodos.
- **Tempo de aquecimento:** Registre o tempo ideal de aquecimento após encontrar o melhor resultado. Esse valor servirá como referência para padronizar as próximas termoformagens no mesmo equipamento.

## INSTRUÇÕES

- 1** Posicione a placa na termoformadora com o lado sem película voltado para a fonte de calor.



Mantenha a película protetora no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado. Isso evita contaminações do alinhador e assegura um acabamento translúcido.

- 2** Aqueça a termoformadora conforme as recomendações do fabricante.



Quando a placa flexionar aproximadamente 1cm, realize o processo de termoplastificação sobre o modelo.

- 3** Realize a termoformagem e vácuo de acordo com o modelo do seu equipamento.
- 4** Resfrie a placa até que ela retorne ao estado rígido.
- 5** Aguarde o resfriamento completo antes de remover a placa.
- 6** Desmolde e faça o acabamento e ajustes de acordo com o necessário.

# ORIENTAÇÕES GERAIS

- Deve ser termoformada até 3 horas após a abertura da bolsa protetora.
- Se a placa não se conformar corretamente ao modelo, aumente o tempo de exposição.
- Indicado para usar com MiniSTAR® / MiniSTAR® S: 30~35s, 4.2 bar e MiniSTAR® / Código MiniSTAR®: 122 / Código MiniSTAR® S: 132
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada, aumentar o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.
- Se a placa ficar com formação de bolhas, reduza o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar a placa para alinhador. **Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas.** Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua **evite utilizar o equipamento superaquecido.**

\*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.

# Conheça a linha MemoryTrack®

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Copoliéster** 0,50 a 1,50mm

Placa monocamada com o inovador Copoliéster modificado e aditivo exclusivo que evita absorção de umidade.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Alinhamento** 0,76mm

Desenvolvida com tecnologia de tripla camada, que combina força suave, controle superior de movimentação dentária, alta transparência e resistência a fraturas por impacto.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Hollywood Smile** 0,76mm

É a primeira placa que, além de corrigir o alinhamento dentário, proporciona uma aparência imediata de dentes mais brancos e uniformes, entregando um sorriso luminoso e radiante desde o início do tratamento

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Contenção** 1mm

Equilíbrio perfeito entre proteção e conforto após o tratamento ortodôntico. Combinando camadas externas rígidas e uma camada interna macia, proporciona um ajuste preciso e confortável, mesmo durante o uso prolongado.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Bruxismo** 2mm

Oferece o equilíbrio ideal entre proteção e conforto para os pacientes. Combinando um lado rígido e outro macio, ela proporciona alta resistência ao ranger dos dentes, garantindo, ao mesmo tempo, um ajuste anatômico preciso e confortável durante o uso.

# Conheça outros produtos OrthoMundi



## TESOURA CURVA PARA ALINHADORES

Corte perfeito, sem  
deixar rebarbas.

[COMPRAR >](#)



## APARELHO+CLEAN

Pastilha para  
higienização de  
aparelhos móveis.

[COMPRAR >](#)



Disponível em  
**8 MODELOS**

## ALICATES PARA ALINHADORES

Pensado para economizar  
tempo, permitindo ajustes  
rápidos.

[COMPRAR >](#)



Disponível em +  
**DE 12 CORES**

## CAIXA CONCHA PARA APARELHO

Com design moderno  
e fecho resistente sem  
risco de abrir na bolsa.

[COMPRAR >](#)



Modelo  
com  
espelho

DISPONÍVEL EM 5 CORES

## CAIXA PREMIUM PARA APARELHO

Com espelho, tapete  
removível e fecho  
magnético.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL

Indicado para verticalização,  
extrusão, ancoragem,  
giroversão e tração.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL POWER ARM

Ideal para extrusão e intrusão  
de molares, tracionamento,  
rotação, retração e ancoragem.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL COM GANCHO

Auxilia no tracionamento,  
rotação, retração, extrusão,  
intrusão de molares ancoragem.

[COMPRAR >](#)

# Conheça outros produtos OrthoMundi



**RESINA KED**  
Impressão perfeita  
de modelos para  
alinhadores e  
protótipos em geral.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR DE  
ALINHADOR PREMIUM**  
Ponta em formato  
de garra "C", que  
facilita a remoção  
segura do alinhador.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR PARA  
ALINHADOR**  
Auxilia o paciente a retirar  
o alinhador com facilidade  
e segurança.

[COMPRAR >](#)



**MORDEDOR PARA  
ALINHADOR**

Formato e textura  
que facilita o encaixe  
do alinhador sem  
escorregar.

[COMPRAR >](#)



**CALIBRADOR DE  
ESPAÇO INTERPROXIMAL**

Sete espessuras para  
mensuração precisa dos  
espaços interproximais,  
após desgaste com lixas  
ou discos diamantados.

[COMPRAR >](#)



**CAIXA PARA  
HIGIENIZAR APARELHO**

Evita a contaminação  
de aparelhos, próteses  
e alinhadores com as  
pastilhas Aparelho+Clean.

[COMPRAR >](#)

# OrthoMundi

Com você do início  
ao fim dos tratamentos

---

[orthomundi.com.br](http://orthomundi.com.br)

   orthomundi

 0800 510 3001