

# PRODUCT GUIDE



CE ISO 13485



# MemoryTrack<sup>®</sup>

## Bruxismo

*Dupla proteção para  
um sono tranquilo*

A placa de dupla camada MemoryTrack<sup>®</sup> Bruxismo oferece o equilíbrio ideal entre proteção e conforto para os pacientes. Combinando um **lado rígido e outro macio, ela proporciona alta resistência ao ranger dos dentes, garantindo, ao mesmo tempo, um ajuste anatômico, preciso e confortável durante o uso.**



# MemoryTrack<sup>®</sup>

## Bruxismo



### DUPLA CAMADA

A tecnologia de camadas rígida e macia proporciona o equilíbrio ideal entre conforto e funcionalidade, garantindo proteção eficaz aos dentes e alívio dos sintomas decorrentes do apertamento excessivo.



### MAIOR DURABILIDADE

Possui uma camada rígida que confere alta durabilidade e resistência ao desgaste provocado pelo ranger ou apertamento dos dentes, minimizando o risco de deterioração em comparação às placas 100% TPU.



### CONFORTO E ABSORÇÃO DE IMPACTOS

O ajuste é confortável devido à camada macia, mesmo durante longos períodos de uso, adaptando-se anatomicamente aos dentes e absorvendo a força do apertamento de forma eficiente, minimizando a tensão muscular e articular associada ao bruxismo.



### TECNOLOGIA MULTIFUNCIONAL

Projetada para diversas finalidades, como Michigan/estabilizadoras para DTM, AIO (Aparelhos Intraorais) de Ronco e Apneia, aparelhos Silensor-sl, guias caninas, guias cirúrgicos, aplicação de medicamentos e bruxismo.

# MemoryTrack® Bruxismo é livre de BPA

## SAÚDE E CUIDADO PARA OS SEUS PACIENTES

A Placa MemoryTrack® Bruxismo é **100% livre de BPA** (Bisfenol A), garantindo mais segurança e preservando a saúde de seus pacientes.

## ENTENDA POR QUE O BPA É NOCIVO

O BPA é uma substância encontrada em plásticos de policarbonato, comumente usados em garrafas de água e copos reutilizáveis. O problema surge quando esses plásticos são expostos a altas temperaturas, liberando toxinas prejudiciais à saúde que podem causar alterações hormonais e contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças.



# DICAS CLÍNICAS



- A placa MemoryTrack® dupla camada 2mm possui película no lado macio.
- Não retire a película antes da termoformagem.
- A placa deve ser termoformada em até 15 minutos após a abertura da embalagem.
- A placa MemoryTrack® Bruxismo possui uma proteção no lado macio. Veja abaixo como otimizar seus resultados a partir do uso da película.

## PROTEÇÃO

Mantenha a película do lado macio, que protege a placa do modelo, para garantir melhor acabamento e facilidade na higienização, eliminando o trabalho de remover manchas e contaminações.

## PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

A placa possui uma película protetora que cria uma barreira entre ela e o modelo, impedindo que partículas soltas ou resina não curada contaminem o aparelho.

## MELHOR ACABAMENTO

A superfície interna da placa fica mais lisa, sem marcas causadas por irregularidades no modelo, garantindo um aparelho mais transparente e sem reentrâncias para o acúmulo de resíduos.

## PRODUTIVIDADE E HIGIENE

A película também elimina o trabalho de remover manchas ou contaminações após a termoformagem, aumentando a resistência do alinhador a fraturas.

## MAIOR RESISTÊNCIA DA PLACA

Atua como auxílio para um resfriamento mais uniforme após a termoformagem, aumentando a resistência do aparelho a fraturas.

## EFICIÊNCIA

O aparelho permite que essa película seja removida de maneira fácil e completa do aparelho após a termoformagem, acelerando o processo de produção.

## TEMPO DE TERMOFORMAGEM

Deve ser termoformada até 15 minutos após a abertura da bolsa protetora.

## SEM DESPERDÍCIOS

Contém apenas 1 unidade, evitando o risco de perda em comparação com opções que encontramos no mercado.

## TEMPO IDEAL DE AQUECIMENTO

Registre o tempo ideal de aquecimento após encontrar o melhor resultado. Esse valor servirá como referência para padronizar as próximas termoformagens no mesmo equipamento.

# INSTRUÇÕES

- 1** Posicione a placa na termoformadora de modo que a película fique voltada para o modelo.



Remova a película protetora apenas do lado exposto ao calor da plastificadora, **mantendo o plástico transparente no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado**. Isso evita contaminações por toxinas remanescentes.

- 2** Coloque a placa na termoplastificadora com a película do lado macio voltada para o modelo.

- 3** Aqueça a termoplastificadora conforme sugerido pelo fabricante.



Quando a placa flexionar aproximadamente 1cm, realize o processo de termoplastificação sobre o modelo.

- 4** Realize o processo de termoplastificação e vácuo de acordo com o modelo da sua plastificadora.

- 5** Resfrie a placa até que ela retorne ao estado rígido.

- 6** Faça o desmolde da placa e do modelo normalmente.

- 7** Faça o acabamento e ajustes de acordo com o tratamento.

# ORIENTAÇÕES GERAIS

- Se a placa não se conformar corretamente ao modelo, aumente o tempo de exposição.
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada, aumentar o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.
- Indicado para usar com MiniSTAR® / MiniSTAR® S: 60~65s, 4.2 bar e MiniSTAR® / Código MiniSTAR®: 183 / Código MiniSTAR® S: 193 .
- Se a placa ficar com formação de bolhas, reduza o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar o aparelho. **Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas.** Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua **evite utilizar o equipamento superaquecido.**

\*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.

# Conheça a linha MemoryTrack®

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Copoliéster** 0,50 a 1,50mm

Placa monocamada com o inovador Copoliéster modificado e aditivo exclusivo que evita absorção de umidade.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Alinhamento** 0,76mm

Desenvolvida com tecnologia de tripla camada, que combina força suave, controle superior de movimentação dentária, alta transparência e resistência a fraturas por impacto.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Hollywood Smile** 0,76mm

É a primeira placa que, além de corrigir o alinhamento dentário, proporciona uma aparência imediata de dentes mais brancos e uniformes, entregando um sorriso luminoso e radiante desde o início do tratamento

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Contenção** 1mm

Equilíbrio perfeito entre proteção e conforto após o tratamento ortodôntico. Combinando camadas externas rígidas e uma camada interna macia, proporciona um ajuste preciso e confortável, mesmo durante o uso prolongado.

## OrthoMundi

### MemoryTrack®

**Bruxismo** 2mm

Oferece o equilíbrio ideal entre proteção e conforto para os pacientes. Combinando um lado rígido e outro macio, ela proporciona alta resistência ao ranger dos dentes, garantindo, ao mesmo tempo, um ajuste anatômico preciso e confortável durante o uso.

# Conheça outros produtos OrthoMundi



## TESOURA CURVA PARA ALINHADORES

Corte perfeito, sem  
deixar rebarbas.

[COMPRAR >](#)



## APARELHO+CLEAN

Pastilha para  
higienização de  
aparelhos móveis.

[COMPRAR >](#)



Disponível em  
**8 MODELOS**

## ALICATES PARA ALINHADORES

Pensado para economizar  
tempo, permitindo ajustes  
rápidos.

[COMPRAR >](#)



Disponível em +  
**DE 12 CORES**

## CAIXA CONCHA PARA APARELHO

Com design moderno  
e fecho resistente sem  
risco de abrir na bolsa.

[COMPRAR >](#)



Modelo  
com  
espelho

DISPONÍVEL EM 5 CORES

## CAIXA PREMIUM PARA APARELHO

Com espelho, tapete  
removível e fecho  
magnético.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL

Indicado para verticalização,  
extrusão, ancoragem,  
giroversão e tração.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL POWER ARM

Ideal para extrusão e intrusão  
de molares, tracionamento,  
rotação, retração e ancoragem.

[COMPRAR >](#)



## BOTÃO CERÂMICO LINGUAL COM GANCHO

Auxilia no tracionamento,  
rotação, retração, extrusão,  
intrusão de molares ancoragem.

[COMPRAR >](#)

# Conheça outros produtos OrthoMundi



**RESINA KED**  
Impressão perfeita  
de modelos para  
alinhadores e  
protótipos em geral.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR DE  
ALINHADOR PREMIUM**  
Ponta em formato  
de garra "C", que  
facilita a remoção  
segura do alinhador.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR PARA  
ALINHADOR**  
Auxilia o paciente a retirar  
o alinhador com facilidade  
e segurança.

[COMPRAR >](#)



**MORCEDOR PARA  
ALINHADOR**  
Formato e textura  
que facilita o encaixe  
do alinhador sem  
escorregar.

[COMPRAR >](#)



**CALIBRADOR DE  
ESPAÇO INTERPROXIMAL**  
Sete espessuras para  
mensuração precisa dos  
espaços interproximais,  
após desgaste com lixas  
ou discos diamantados.

[COMPRAR >](#)



**CAIXA PARA  
HIGIENIZAR APARELHO**  
Evita a contaminação  
de aparelhos, próteses  
e alinhadores com as  
pastilhas Aparelho+Clean.

[COMPRAR >](#)

# OrthoMundi

Com você do início  
ao fim dos tratamentos

---

[orthomundi.com.br](http://orthomundi.com.br)

   orthomundi

 0800 510 3001