

PRODUCT GUIDE



CE ISO 13485



MemoryTrack[®]

Contenção

***Proteção e conforto
para seus pacientes***

A placa de contenção tripla camada MemoryTrack[®] oferece o equilíbrio perfeito entre **proteção e conforto para preservar os resultados alcançados ao final do tratamento ortodôntico**. Combinando camadas externas rígidas e uma camada interna macia, proporciona um **ajuste preciso e confortável, mesmo durante o uso prolongado**.



MemoryTrack®

Contenção

A melhor opção para alinhadores in office



3X MAIS RETENÇÃO

Conforto, estabilidade e resistência em uma só placa. Cada camada atua de forma inteligente para garantir uma contenção eficiente e com máxima durabilidade.



3X MAIS DURABILIDADE

Mais resistência ao desgaste, menos trocas. A dupla camada externa de Copoliéster proporciona maior vida útil da placa com a percepção estética preservada.



3X MAIS CONFORTO

Com núcleo em TPU macio, a placa é extremamente confortável, absorve impactos e oferece uma experiência superior para o paciente.



3X MAIS ESTABILIDADE

Ajuste preciso que mantém o alinhamento dos dentes e os resultados do tratamento com a garantia de segurança prolongada.



3X MAIS RESISTENTE

Superfície lisa e de baixa porosidade que resiste à pigmentação, mantendo o visual sempre limpo e discreto.

MemoryTrack® Contenção é livre de BPA

SAÚDE E CUIDADO PARA OS SEUS PACIENTES

A Placa MemoryTrack® Contenção é **100% livre de BPA** (Bisfenol A), garantindo mais segurança e preservando a saúde de seus pacientes.

ENTENDA POR QUE O BPA É NOCIVO

O BPA é uma substância encontrada em plásticos de policarbonato, comumente usados em garrafas de água e copos reutilizáveis. O problema surge quando esses plásticos são expostos a altas temperaturas, liberando toxinas prejudiciais à saúde que podem causar alterações hormonais e contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças.



DICAS CLÍNICAS



- **EMBALAGEM PRÁTICA E QUE EVITA DESPERDÍCIO:** Placas embaladas a vácuo com 4 unidades, ideais para produção sob demanda, evitando perdas comuns em pacotes maiores.
- **FÁCIL ARMAZENAMENTO:** Após aberta, a placa deve ser termoformada em até 3 horas. As unidades não utilizadas podem ser facilmente protegidas novamente na embalagem original com uma seladora, embalagem ZIP, caixa plástica com sílica gel, entre outros métodos.
- **Alinhador mal adaptado?** Aumente o tempo de aquecimento em pequenos incrementos.
- **TEMPO IDEAL DE AQUECIMENTO:** Registre o tempo ideal de aquecimento após encontrar o melhor resultado. Esse valor servirá como referência para padronizar as próximas termoformagens no mesmo equipamento.

INSTRUÇÕES

- 1** Posicione a placa na termoformadora com o lado sem película voltado para a fonte de calor.



Mantenha a película protetora no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado. Isso evita contaminações do alinhador e assegura um acabamento translúcido.

- 2** Aqueça a termoformadora conforme as recomendações do fabricante.



Quando a placa flexionar aproximadamente 1cm, realize o processo de termoplastificação sobre o modelo.

- 3** Realize a termoformagem e vácuo de acordo com o modelo do seu equipamento.
- 4** Resfrie a placa até que ela retorne ao estado rígido.
- 5** Aguarde o resfriamento completo antes de remover a placa.
- 6** Desmolde e faça o acabamento e ajustes de acordo com o necessário.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

- A termoformagem deve ocorrer em até 3 horas após a abertura da embalagem.
- Os tempos de aquecimento podem variar entre diferentes termoformadoras, inclusive entre máquinas do mesmo modelo, já que fatores como a idade e o estado de conservação da resistência afetam o desempenho.
- Não retire a placa enquanto ainda estiver quente para evitar folgas e má adaptação.
- Parâmetros para MiniSTAR® / MiniSTAR® S:
40–45s | 4.2 bar | Código MiniSTAR®: 142 |
Código MiniSTAR® S: 152 .
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada, aumentar o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.
- Se a placa ficar com formação de bolhas, reduza o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar a placa para alinhador. **Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas.** Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua **evite utilizar o equipamento superaquecido.**

*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.

Conheça a linha MemoryTrack®

OrthoMundi

MemoryTrack®

Copoliéster 0,50 a 1,50mm

Placa monocamada com o inovador Copoliéster modificado e aditivo exclusivo que evita absorção de umidade.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Alinhamento 0,76mm

Desenvolvida com tecnologia de tripla camada, que combina força suave, controle superior de movimentação dentária, alta transparência e resistência a fraturas por impacto.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Hollywood Smile 0,76mm

É a primeira placa que, além de corrigir o alinhamento dentário, proporciona uma aparência imediata de dentes mais brancos e uniformes, entregando um sorriso luminoso e radiante desde o início do tratamento

OrthoMundi

MemoryTrack®

Contenção 1mm

Equilíbrio perfeito entre proteção e conforto após o tratamento ortodôntico. Combinando camadas externas rígidas e uma camada interna macia, proporciona um ajuste preciso e confortável, mesmo durante o uso prolongado.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Bruxismo 2mm

Oferece o equilíbrio ideal entre proteção e conforto para os pacientes. Combinando um lado rígido e outro macio, ela proporciona alta resistência ao ranger dos dentes, garantindo, ao mesmo tempo, um ajuste anatômico preciso e confortável durante o uso.

Conheça outros produtos OrthoMundi



TESOURA CURVA PARA ALINHADORES

Corte perfeito, sem
deixar rebarbas.

[COMPRAR >](#)



APARELHO+CLEAN

Pastilha para
higienização de
aparelhos móveis.

[COMPRAR >](#)



Disponível em
8 MODELOS

ALICATES PARA ALINHADORES

Pensado para economizar
tempo, permitindo ajustes
rápidos.

[COMPRAR >](#)



Disponível em +
DE 12 CORES

CAIXA CONCHA PARA APARELHO

Com design moderno
e fecho resistente sem
risco de abrir na bolsa.

[COMPRAR >](#)



Modelo
com
espelho

DISPONÍVEL EM 5 CORES

CAIXA PREMIUM PARA APARELHO

Com espelho, tapete
removível e fecho
magnético.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL

Indicado para verticalização,
extrusão, ancoragem,
giroversão e tração.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL POWER ARM

Ideal para extrusão e intrusão
de molares, tracionamento,
rotação, retração e ancoragem.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL COM GANCHO

Auxilia no tracionamento,
rotação, retração, extrusão,
intrusão de molares ancoragem.

[COMPRAR >](#)

Conheça outros produtos OrthoMundi



RESINA KED
Impressão perfeita
de modelos para
alinhadores e
protótipos em geral.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR DE
ALINHADOR PREMIUM**
Ponta em formato
de garra "C", que
facilita a remoção
segura do alinhador.

[COMPRAR >](#)



**REMOVEDOR PARA
ALINHADOR**
Auxilia o paciente a retirar
o alinhador com facilidade
e segurança.

[COMPRAR >](#)



**MORDEADOR PARA
ALINHADOR**
Formato e textura
que facilita o encaixe
do alinhador sem
escorregar.

[COMPRAR >](#)



**CALIBRADOR DE
ESPAÇO INTERPROXIMAL**
Sete espessuras para
mensuração precisa dos
espaços interproximais,
após desgaste com lixas
ou discos diamantados.

[COMPRAR >](#)



**CAIXA PARA
HIGIENIZAR APARELHO**
Evita a contaminação
de aparelhos, próteses
e alinhadores com as
pastilhas Aparelho+Clean.

[COMPRAR >](#)

OrthoMundi

Com você do início
ao fim dos tratamentos

orthomundi.com.br

   orthomundi

 0800 510 3001