

PRODUCT GUIDE



CE ISO 13485



MemoryTrack®

Hollywood Smile

*Dentes brancos e alinhados
todos os dias*

A MemoryTrack® Hollywood Smile é a primeira placa que, além de corrigir o alinhamento dentário, proporciona uma aparência imediata de dentes mais brancos e uniformes, entregando um sorriso luminoso e radiante desde o início do tratamento.



MemoryTrack[®]

Hollywood Smile



MAIOR ESTÉTICA

Ideal para pacientes que desejam manter um **sorriso mais bonito durante todo o tratamento com alinhador**, ou para aqueles que buscam realçar a estética do sorriso em ocasiões especiais.



MAIOR RESISTÊNCIA

Feita de copoliéster aprimorado com aditivo especial, a placa é resistente ao calor, incluindo líquidos quentes e à temperatura do corpo. Isso assegura que o alinhador mantenha a forma e não perca o tracking durante o uso diário.



MAIOR EFICIÊNCIA

A alta estabilidade mecânica e dimensional garante um desempenho superior, refletindo em menor perda de encaixe do alinhador ao longo do tratamento, favorecendo a retenção do tracking.



MAIOR EFICÁCIA

Maior resistência à deformação por impacto, desgaste e temperatura, garantindo durabilidade superior e previsibilidade em movimentações complexas ao distribuir forças uniformemente.


MemoryTrack® HollyWood Smile é livre de BPA

SAÚDE E CUIDADO PARA OS SEUS PACIENTES

A Placa MemoryTrack® HollyWood Smile é **100% livre de BPA** (Bisfenol A), garantindo mais segurança e preservando a saúde de seus pacientes.

ENTENDA POR QUE O BPA É NOCIVO

O BPA é uma substância encontrada em plásticos de policarbonato, comumente usados em garrafas de água e copos reutilizáveis. O problema surge quando esses plásticos são expostos a altas temperaturas, liberando toxinas prejudiciais à saúde que podem causar alterações hormonais e contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças.

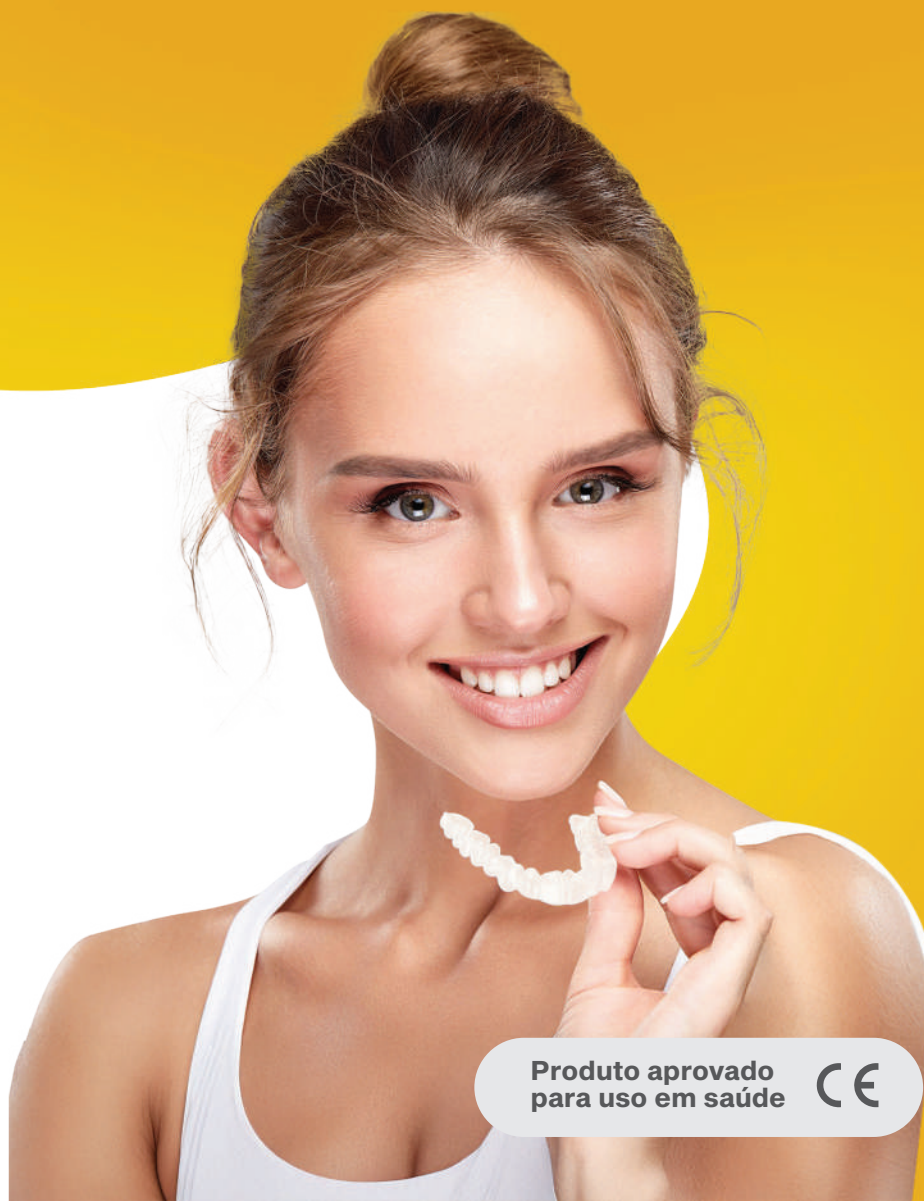

DICAS CLÍNICAS



- Sorrisos gengivais: não utilize o corte reto. Prefira o corte festonado, que proporciona um acabamento mais harmônico e estético.
- Para um resultado visual preciso e natural, realize um escaneamento digital detalhado, especialmente nas faces proximais. Isso garante que o modelo 3D reproduza todas as nuances da anatomia dental e que o alinhador tenha contornos ideais para um resultado estético perfeito.
- A placa MemoryTrack® Hollywood Smile possui proteção em um dos lados. Veja abaixo como otimizar seus resultados a partir do uso da película.

PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

Impede que partículas soltas ou resinas não curadas entrem em contato com a superfície da placa.

MELHOR ACABAMENTO

Garante uma superfície mais lisa, transparente e livre de reentrâncias.

PRODUTIVIDADE E HIGIENE

Evita trabalho com limpeza ou polimento pós-termoformagem.

MAIOR RESISTÊNCIA DA PLACA

O resfriamento mais uniforme fortalece a estrutura da placa, reduzindo o risco de fraturas.

EFICIÊNCIA

A película é facilmente removida após a termoformagem, otimizando o fluxo de trabalho.

TEMPO DE TRABALHO

Após abrir a embalagem a vácuo, a placa deve ser utilizada em até 3 horas.

SEM DESPERDÍCIOS

Duas placas embaladas a vácuo por pacote, permitindo controle mais preciso na produção e evitando perdas comuns de embalagens com mais unidades.

TEMPO IDEAL DE AQUECIMENTO

Registre o tempo ideal de aquecimento após encontrar o melhor resultado. Esse valor servirá como referência para padronizar as próximas termoformagens no mesmo equipamento.

INSTRUÇÕES

- 1** Não retire a película antes da termoformagem. Posicione a placa na termoformadora de modo que o lado que contém a película fique voltado para o modelo.



Remova a película protetora apenas do lado exposto ao calor da plastificadora, **mantendo o plástico transparente no lado que ficará em contato com o modelo a ser termoformado**. Isso evita contaminações por toxinas remanescentes e assegura um **acabamento translúcido** no alinhador.

- 2** Coloque a placa na termoplastificadora com a película voltada para o modelo.

- 3** Aqueça a termoplastificadora conforme sugerido pelo fabricante.



Quando a placa flexionar aproximadamente 1cm, realize o processo de termoplastificação sobre o modelo.

- 4** Realize o processo de termoplastificação e vácuo de acordo com o modelo da sua plastificadora.

- 5** Resfrie a placa até que ela retorne ao estado rígido.

- 6** Faça o desmolde da placa e do modelo normalmente.

- 7** Faça o acabamento e ajustes de acordo com o tratamento.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Após abrir a bolsa protetora, o tempo recomendado para termoformar a placa em até 3 horas, podendo ser reduzido em ambientes com alta umidade.
- Se a placa não se conformar corretamente ao modelo, aumente o tempo de exposição.
- Se a placa ficar com folgas, vincos, sinais de deformação exagerada, aumentar o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.
- Indicado para usar com MiniSTAR® / MiniSTAR® S: 30~35s, 4.2 bar e MiniSTAR® / Código MiniSTAR®: 142 / Código MiniSTAR® S: 152.
- Se a placa ficar com formação de bolhas, reduza o tempo de aquecimento em 5 segundos, realize um novo teste e reavalie.



Cuidado com a temperatura utilizada para moldar a placa para alinhador. **Temperaturas elevadas podem ocasionar no aparecimento de bolhas.** Observe se sua plastificadora possui controle de temperatura, caso não possua **evite utilizar o equipamento superaquecido.**

*Válido para todas as marcas e placas para alinhadores.



Conheça a linha MemoryTrack®

OrthoMundi

MemoryTrack®

Copoliéster 0,50 a 1,50mm

Placa monocamada com o inovador Copoliéster modificado e aditivo exclusivo que evita absorção de umidade.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Alinhamento 0,76mm

Desenvolvida com tecnologia de tripla camada, que combina força suave, controle superior de movimentação dentária, alta transparência e resistência a fraturas por impacto.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Hollywood Smile 0,76mm

É a primeira placa que, além de corrigir o alinhamento dentário, proporciona uma aparência imediata de dentes mais brancos e uniformes, entregando um sorriso luminoso e radiante desde o início do tratamento

OrthoMundi

MemoryTrack®

Contenção 1mm

Equilíbrio perfeito entre proteção e conforto após o tratamento ortodôntico. Combinando camadas externas rígidas e uma camada interna macia, proporciona um ajuste preciso e confortável, mesmo durante o uso prolongado.

OrthoMundi

MemoryTrack®

Bruxismo 2mm

Oferece o equilíbrio ideal entre proteção e conforto para os pacientes. Combinando um lado rígido e outro macio, ela proporciona alta resistência ao ranger dos dentes, garantindo, ao mesmo tempo, um ajuste anatômico preciso e confortável durante o uso.

Conheça outros produtos OrthoMundi



TESOURA CURVA PARA ALINHADORES

Corte perfeito, sem
deixar rebarbas.

[COMPRAR >](#)



APARELHO+CLEAN

Pastilha para
higienização de
aparelhos móveis.

[COMPRAR >](#)



Disponível em
8 MODELOS

ALICATES PARA ALINHADORES

Pensado para economizar
tempo, permitindo ajustes
rápidos.

[COMPRAR >](#)



Disponível em +
DE 12 CORES

CAIXA CONCHA PARA APARELHO

Com design moderno
e fecho resistente sem
risco de abrir na bolsa.

[COMPRAR >](#)



Modelo
com
espelho

DISPONÍVEL EM 5 CORES

CAIXA PREMIUM PARA APARELHO

Com espelho, tapete
removível e fecho
magnético.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL

Indicado para verticalização,
extrusão, ancoragem,
giroversão e tração.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL POWER ARM

Ideal para extrusão e intrusão
de molares, tracionamento,
rotação, retração e ancoragem.

[COMPRAR >](#)



BOTÃO CERÂMICO LINGUAL COM GANCHO

Auxilia no tracionamento,
rotação, retração, extrusão,
intrusão de molares ancoragem.

[COMPRAR >](#)

Conheça outros produtos OrthoMundi



RESINA KED
Impressão perfeita de modelos para alinhadores e protótipos em geral.

[COMPRAR >](#)



REMOVEDOR DE ALINHADOR PREMIUM

Ponta em formato de garra "C", que facilita a remoção segura do alinhador.

[COMPRAR >](#)



REMOVEDOR PARA ALINHADOR

Auxilia o paciente a retirar o alinhador com facilidade e segurança.

[COMPRAR >](#)



MORDEDOR PARA ALINHADOR

Formato e textura que facilita o encaixe do alinhador sem escorregar.

[COMPRAR >](#)



CALIBRADOR DE ESPAÇO INTERPROXIMAL

Sete espessuras para mensuração precisa dos espaços interproximais, após desgaste com lixas ou discos diamantados.

[COMPRAR >](#)



CAIXA PARA HIGIENIZAR APARELHO

Evita a contaminação de aparelhos, próteses e alinhadores com as pastilhas Aparelho+Clean.

[COMPRAR >](#)

OrthoMundi

Com você do início
ao fim dos tratamentos

orthomundi.com.br

   orthomundi

 0800 510 3001